

巻くだけ伸縮包帯 **ワン**

サイズ

犬用 包帯

この説明書は大切に保管してください。

安全にご使用いただくために必ずお読みください。



注意

●本品は犬用です。犬以外には使用しないでください。●ラテックスアレルギー体質の人や犬は使用しないでください。●人やペットが破片等を誤飲しないように注意してください。万一、誤飲した場合は各医師に相談してください。●使用前に破損箇所がないかを必ず確認してください。汚れが目立ち始めたら新しく巻き直してください。●犬の健康状態を確認のうえ、使用してください。●使用部位にキズ・炎症・床ずれ・骨折等がある場合は、直接皮フに巻かないでください。●万一、異常が見られた場合は直ちに使用を中止し、獣医師に相談してください。●強く引っ張り、しめすぎないように注意してください。伸縮性が高いため、血行障害を起こしたり、皮フをキズつける恐れがあります。●長時間の使用はさけてください。●本品を犬がかんだり、引っかいたりしないように注意してください。●かみグセのある犬には使用しないでください。●犬が嫌がる場合は、無理に使用しないでください。●幼児・子供には使用させないでください。●火気や水気のそばでの使用や保管はしないでください。●幼児・子供・ペットのふれない所に保管してください。

商品特長

- ・ 留め具なしで固定可能
- ・ 巻き直しが可能
- ・ 伸縮性に優れ、関節部等にフィット
- ・ 手でカット可能



傷口なめの対策に



ガーゼの固定に



尻尾の汚れ対策に

使用方法

- ①巻きたい部位が、かくれるように巻いてください。
※キズ等がある場合は、ガーゼをあてがってから巻いてください。
- ②巻き終わったら、手・ハサミでカットしてください。
- ③切った端を最後まで巻きつければ、固定できます。
※きつく巻きすぎないでください。局所血行障害がおこり、症状が悪化する恐れがあります。

お手入れ・保管方法

- いつも清潔に保ってください。
- 汚れたままでの使用や保管はしないでください。
- 漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコール等は絶対に使用しないでください。
- 直射日光・高温多湿の場所をさけて保管してください。

案内

- ★本品にベタつきがでることがありますが、なめても問題ありません。
- ★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ★品質管理には万全を期しておりますが、お気づきの点がありましたらお客様相談室までお問合せください。

品質表示

ポリプロピレン・天然ゴム
ウレタンフォーム

商品コード：W23621

商品名：老犬介護用

巻くだけ伸縮包帯



4 903588 236211



販売者 株式会社 ペティオ

東京本社 〒105-0014 東京都港区芝1-10-11 コスモ金杉橋ビル4F

お客様相談室
☎0120-133-035受付時間：祝日を除く月～金曜日
AM9:00～12:00/PM1:00～5:00

http://www.petio.com

MADE IN CHINA

R10